

### Su kit de recolección contiene:

- 1 colector innovador para la recolección capilar (gota de sangre)
- 1 tubo de plástico con tapa para almacenamiento de muestras
- 2 lancetas automáticas
- 1 sobre de hisopo con alcohol
- 1 apósito adhesivo
- 1 bolsa de devolución

### ! Preparación

- 1- Comprueba que todos los artículos del Kit sean correctos
- 2- Separar los materiales relacionados con la recolección y la asepsia de las manos
- 3- Retire el colector del interior del tubo de plástico
- 4- Siga las instrucciones a continuación


## Instrucciones paso a paso




- 1 Lávese las manos** con agua y jabón y séquelas.



- 2 Calienta tus manos** frotándolas juntas. También puede calentarse las manos caminando, saltando o cualquier otro método de su elección. **Calentar las manos es IMPORTANTE para un buen flujo sanguíneo.**

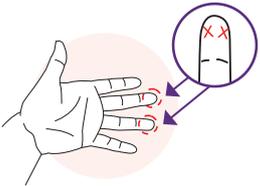

- 3 Seleccione el dedo que utilizará** para proporcionar la muestra de sangre. Vea la ilustración para obtener los locales recomendados fuera del centro de la línea media del dedo.

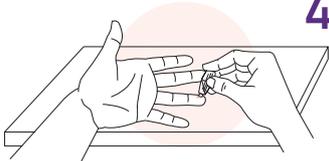

- 4 Pinchar el dedo** colocando la mano sobre una superficie dura. Coloque la lanceta en la ubicación elegida. Aplique una presión firme en la punta de la lanceta hasta que escuche un clic.



- 5 Limpie la primera gota de sangre con el algodón**  
Una gota de sangre puede tardar hasta 20 segundos en formarse. Si es necesario, masajee suavemente el dedo pinchado hacia arriba hasta que se forme una gota.

**Nota:** Evite presiones fuertes y repetitivas sobre el dedo picado, esto puede causar hemólisis



- 6 Recoja la muestra tocando** la punta del colector con la gota de sangre. Primero, mira cómo se vuelve totalmente rojo. Luego cuente hasta 3 segundos. Por último, retire lentamente la punta de la sangre.

Consejo: Incline el colector en la posición de 45° al tocar la gota de sangre del su dedo, como se muestra arriba.

**NO vierta sangre en la punta.**

### Asegúrese de que las puntas del recopilador se rellenan correctamente

La recolección insuficiente ocurre cuando: 1) La punta del colector se retira demasiado rápido de la sangre. Toque la punta con la sangre hasta que no quede espacio en blanco en la punta del colector. 2) Se interrumpe el flujo sanguíneo. Si esto sucede, repita los pasos 4 a 6 con la misma punta hasta que se vuelva completamente roja.



**Exceso de muestra**




**Muestra insuficiente**



**Muestra adecuada**


El exceso de la muestra ocurre cuando la sangre se gotea sobre la punta del colector. Siempre toque la punta de muestreo en la gota de sangre como se muestra en el paso 6.

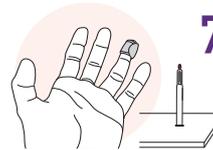

- 7 Coloque el colector** de pie durante unos 10 minutos hasta que su punta se seque por completo. Aplique el vendaje en su dedo.



- 8 Guarde el colector** en el tubo de plástico suministrado con el kit (con la punta del colector hacia adentro del tubo). Identifique su muestra con su nombre completo y fecha de nacimiento en la etiqueta que viene con el kit.

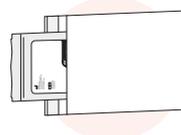

- 9 Envíe** su muestra junto con el formulario de solicitud completamente completado y firmado dentro de la bolsita.